

CarpoLock™ Bandage



Für den professionellen Einsatz bei: Torsion, Gelenkinstabilitäten, Überbelastung, Bänderdehnung /-zerrung, Stauchung, Entzündung, postoperative Stabilisierung.

Inhalt: 1 Bandage, 1 elastischer Gurt, 1 unelastischer Gurt, 2 Aluminiumstäbe, 2 flexible Federstäbe. Bei Bandage S sind nur flexible Federstäbe enthalten.

CarpoLock ist eine hochwertige medizinische Bandage, die von Pfaff-Tierorthopädie, speziell für Diagnosen am Carpalgelenk von Hunden entwickelt wurde.

Das dichtzellige, hochwertige perforierte Neopren hat eine sehr gute Stützkraft und behält seine Form. Durch die Perforation wird die Haut, im Gegensatz zu Castverbänden, ausreichend mit Luft versorgt. Minimiert die Gefahr von Wundstellen.

Das Anlegen der Bandage:



Soll das Carpalgelenk komplett fixiert werden müssen Sie zunächst die Aluminiumstäbe dem anatomischen Verlauf entsprechend links und rechts anpassen. Sie können die Stäbe von Hand, oder mit Hilfe einer Flachzange entsprechend biegen.



Wichtig ist, dass im direkten Gelenkbereich ein Abstand von ca. 2-3mm eingehalten wird. Oberhalb und unterhalb des Gelenks müssen die Stäbe flächig anliegen.

Wenn die Stäbe angepasst sind, stecken Sie diese in die Öffnungen oben an den seitlichen aufgenähten Gurten ein.

Wenn bei der ersten Anpassung eine Schwellung vorhanden ist, müssen Sie nach Rückgang der Schwellung die Aluminiumstäbe evtl. etwas nachmodellieren.



Die Bandage wird von hinten an den Lauf angelegt und vorne am Klett verschlossen. Achten Sie darauf, dass die Bandage ca. 1-1,5 cm oberhalb vom Pfotenrücken endet, damit die Bewegung der Pfote nicht eingeschränkt wird. Es sei denn, es ist aus tierärztlicher Sicht gewünscht.



Der unelastische Gurt wird je nach Schwere der Diagnose eingesetzt, um eine größere Stabilität und Fixation zu erreichen. Wenn sich der Zustand verbessert hat, können Sie den flexiblen Gurt einsetzen. Die Spannung können Sie per Zugkraft regulieren.

Bei leichteren Diagnosen stecken Sie anstatt der Aluminiumstäbe, die flexiblen Federstäbe in die Taschen ein. Je nach gewünschter Beweglichkeit des Carpalgelenks, können Sie zusätzlich den elastischen Gurt einsetzen. Sollte nach dem Anlegen der Bandage die Pfote anschwellen, lockern Sie diese etwas.



Reinigung der Bandage bei 30° Handwäsche. Vor dem Waschen müssen die Stäbe aus den Taschen entfernt werden. Keine scharfen Reiniger und Lösungsmittel verwenden, diese lösen die Kaschierung. Desinfektionsmittel und reiner Alkohol zum Reinigen sind erlaubt. Die Bandage ist nicht Trockner geeignet. Trocknen Sie die Bandage in der Nähe der Heizung, nicht darauf.

Diese hochwertige Bandage ist absolut hautverträglich und wird unter ständiger Qualitätskontrolle in einer eigenen Produktionsstätte von Tierorthopädietechnik Pfaff in Europa gefertigt.

Weitere Informationen zu Hilfsmitteln wie: Tragehilfen, Gewichtsmanschetten, Prothesen und Orthesen finden Sie unter www.tierhilfen.de